


Undersøgelse for misbrugsstoffer i urin

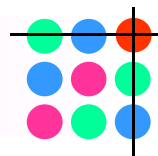

Rekvissionsseddel :: KBL Misbrugsstoffer :: Version 3.1 :: Enkelt sæt

Patientens navn og CPR-nummer	Dato & klokkeslæt	Forbeholdt laboratoriet
	Signatur	
Rekvirent	Betaler Udfyldes kun hvis det ikke er rekvirenten. Husk EAN-nr.!	
EAN:	LABKA-ID:	

Afkryds de ønskede undersøgelser

- | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Amfetamin | <input type="checkbox"/> Cannabis | <input type="checkbox"/> Morfin, heroin |
| <input type="checkbox"/> Methamfetamin | <input type="checkbox"/> Kokain | <input type="checkbox"/> kodein |
| <input type="checkbox"/> Ecstasy | <input type="checkbox"/> Benzodiazepiner | <input type="checkbox"/> Ketobemidon |
| <input type="checkbox"/> Khat | | <input type="checkbox"/> Tramadol |
| | | <input type="checkbox"/> Metadon |
| | | <input type="checkbox"/> Buprenorfin |

Får patienten medicin af nogen art?	Er patienten i behandling med -
	Metadon? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
	Buprenorfin? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej (Subutex; Suboxone)

Vejledninger

Begge de vedlagte rør skal fyldes med patientens urin og sendes til laboratoriet samme dag.

- ▶ Se instrukserne vedrørende mærkning, fyldning, pakning og forsendelse på bagsiden af denne seddel.
- ▶ Se under »Misbrugsstoffer« på www.labrisskov.dk vedrørende prøvetagning, fortolkning af resultater, svartider, priser m.m.

Bestilling af nye prøvesæt

Send _____ prøvesæt til:

Instrukser

Sådan mærkes rørene

Skriv patientens navn og CPR-nummer på de vedlagte labels og klæb dem på prøverørene.

Skriv venligst læseligt!

Sådan fyldes prøverørene

NB! Begge rør skal fyldes og sendes til laboratoriet.

- Tag den lille prop af røret og sæt den lange studs på i stedet.
- Stik studsene ned i urinprøven og træk stemplet tilbage indtil der mangler ½ cm.
- Træk studsene op af urinen og træk stemplet helt tilbage, indtil det siger klik.
- Fjern studsene, sæt proppen på og bræk stemplet af.

Forsendelse af rørene med post eller kurér

NB! Rørene skal *altid* pakkes og sendes i de vedlagte UN3373 godkendte emballager. Det gælder også, når prøverne sendes med kurér.

- Stik de to rør ned i hver sin lomme i folderen af væskeabsorberende materiale. Bøj den øverste del ned over lommerne og rul folderen sammen.
- Put folderen ned i plasticposen, træk aluminiumsfolien ved posens åbning af og klæb den omhyggeligt sammen.
- Put plasticposen og den udfyldte rekvisitionsseddel i den adresserede boblekuvert.

Flere informationer på www.labrisskov.dk

Du kan finde mange informationer om misbrugsanalyser på vores hjemmeside.

